

**Krähe WORKWEAR GmbH & Co. KG**

Ulrich-Gminder-Str. 7  
72654 Neckartenzlingen  
Mail: kontakt@kraehe.de  
Internet: www.kraehe.de

**Herstellerinformation und Gebrauchsanweisung für KRÄHE Mund-Nasen-Masken**

**Bindeband Art. MS110**     **100% Polyester**  
**65% Polyester / 35% Baumwolle**  
**60% Baumwolle / 40% Polyester**

**Pflegesymbole**

Diese Symbole geben Auskunft über die anzuwendenden Pflegeverfahren.



Wäsche bei 60 °C



Nicht chlören



Nicht im Trockner trocknen



heiß Bügeln



Chemische Reinigung

**Pflege:** Für die Durchführung von Pflegebehandlungen sind oben aufgeführte Pflegesymbole zu beachten. **Bitte waschen Sie die Mund und Nasen Maske vor dem 1. Tragen bei 60°C!** Bänder vor dem Waschen zusammenbinden um ein Verknoten zu verhindern. Empfohlen wird ein Waschen im Wäschesack, der bei uns erhältlich ist.

**Gebrauchshinweise**

Bei der KRÄHE Mund-Nasen-Maske handelt es sich um eine Behelfs-Mund-Nasen-Maske. Wir weisen darauf hin, dass es weder um ein Medizinprodukt (ME) noch um eine persönliche Schutzausrüstung (PSA) handelt.

**Tragehinweise:** Die Mund-Nasen-Masken sind nur über Mund und Nase zu tragen und müssen richtig bedeckt sein. Bei Durchfeuchtung ist die Maske abzusetzen oder zu wechseln. Die Maske soll möglichst kontaminationssicher in einem Beutel o.Ä. luftdicht verschlossen oder sofort gewaschen werden. Hände und ggf. auch die entsprechende Gesichtspartie sind vor und nach dem Absetzen, oder sonstiger Berührung der Maske, mit Seife zu waschen und/oder mit geeignetem Desinfektionsmittel zu reinigen.

**Trageweise Variante 1:**

Die Mund-Nasen-Maske beim Tragen stets Mund und Nase bedecken. Bindebänder sind am Hinterkopf zu schließen und können so individuell der Kopfgröße angepasst werden.

Trageweise Variante 2:



Die Mund-Nasen-Maske beim Tragen stets Mund und Nase bedecken. Bindebänder hinter den Ohren schließen und gegebenenfalls Bänder entsprechend kürzen. Enden verknoten, damit das Band beim Waschen nicht aufgeht.

Werden Mund-Nasen-Masken trotz anderslautender Hinweise / Kennzeichnung des Herstellers anderweitig verwendet, dann erfolgt dies eigenverantwortlich durch den Anwender.

**Verfallzeit/Lebensdauer:** Die tatsächliche Lebensdauer ist ausschließlich vom Zustand des Produktes abhängig, der von zahlreichen Faktoren beeinflusst wird. Mechanische Abnutzung oder andere Einflüsse wie z.B. Waschverfahren, Temperatur, Ladegewichts, Behandlung oder die Einwirkung von Sonnenlicht, reduzieren die Lebensdauer. Eine allgemeine Aussage zur Gebrauchsdauer bzw. zeitliche Angaben sind daher nicht möglich.

**Entsorgung:** Die Maske ist nach Gebrauchsende im Hausmüll zu entsorgen. Sie darf nicht bei der Altkleider Entsorgung verwertet werden.

**Krähe WORKWEAR GmbH & Co. KG**